

## **Транспортная упаковка биологического материала для отправки в лабораторию**

1. Поместите пробирки в полиэтиленовый пакет подходящего размера с ватой или другим гигроскопичный материалом. Упаковка должна быть герметично закрыта.
2. Поместите пакет с пробиркой во второй пакет и закройте его герметично.
3. Пакеты поместите в герметично закрывающийся металлический контейнер для транспортировки биологических материалов.
4. Загерметизируйте металлический контейнер.
5. Металлический контейнер поместите в транспортный термоконтейнер с охлаждающими элементами.
6. Транспортный контейнер герметично опечатывается и маркируется.
7. К наружной стенке термоконтейнера прикрепите этикетку с указанием вида материалов, условий транспортирования, названием пункта назначения.
8. Как можно скорее передайте отобранные образцы биологического материала на исследование.